

康大夫隧道式血壓計

Automatic Blood Pressure Monitor



升級彩色螢幕 輕鬆辨識

MD-510 以高精度量測模組，搭配高畫質TFT，提供使用者更清晰、直觀的讀取體驗。

加大袖筒 舒適有感

專為不同手臂尺寸設計的加大袖筒，更貼合人體，並提供穩定且舒適的測量感受。





康大夫隧道式血壓計 (MD-510)




輕鬆更換壓脈帶

拆卸壓脈帶

- 1、確認電源開關置於“斷開(O)” 拔下電源線
- 2、拉出壓脈帶前方上側的布，從臂筒槽中拆下

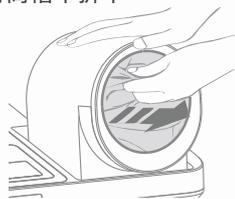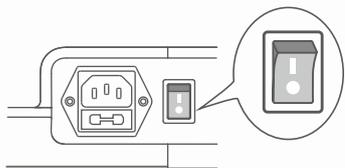


- 3、拉出壓脈帶後方上側的布，從臂筒槽中拆下
- 4、將壓脈帶從臂筒前方拉出

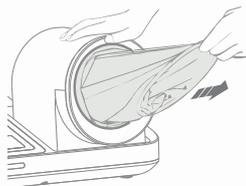

安裝壓脈帶

- 1、將壓脈帶的一端圓環從臂筒前方伸入，後方取出
- 2、將壓脈帶圓環裝入臂筒前方槽中

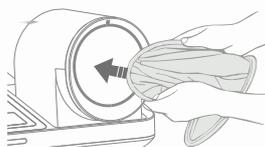

- 3、將壓脈帶圓環裝入臂筒後方槽中
- 4、確認壓脈帶兩端圓環全部裝入槽中



“提升測量準確性”引導使用者正確坐姿

肘部檢測感應器

本機檢測到用戶手肘位置正確時，會進行提示。



精準測量

當螢幕顯示“手肘位置正確”時，代表肘部位置正確。




活動袖筒

袖筒提供角度調整，使手部保持在最佳角度及坐姿



數據傳輸

只需將數據傳輸線從 MD-510 連接至電腦等設備即可進行資料傳輸。

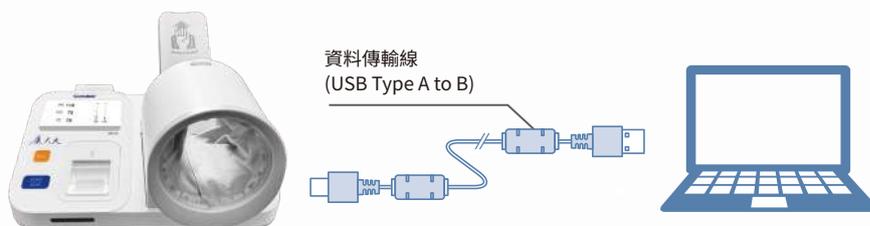

其他特色

■ 適配於大範圍手臂圍
(17公分~45公分)

■ 左手臂及右手臂皆可使用



左手示意



右手示意

■ 列印數據格式



<範例>

Comdekk®	
2024/11/29	11:20
姓名:	
ID:	
收縮壓:	135 mmHg
平均壓:	80 mmHg
舒張壓:	107 mmHg
脈搏:	70 BPM
收縮壓:	正常
舒張壓:	正常
www.comdekk.com	

規格表

主機

產品名稱	康大夫隧道式血壓機(MD-510)
產品性質	臨床用血壓機
型號	MD-510
操作環境 溫度濕度	溫度範圍: 5~40°C 濕度範圍: 15~85% RH 大氣壓力: 70~106 kPa
保存與運輸 溫度濕度	溫度範圍: -20~60°C 濕度範圍: 10%RH~95%RH(且無冷凝現象) 大氣壓力: 50~106 hPa
外觀尺寸	約442(長)x364(寬)x276(高)mm
產品重量	約 5.5 kg
顯示方式	TFT顯示
標準配備	手臂支撐架、電源線、列印紙一捲、 壓脈帶、使用說明書

非侵入性血壓測量方法及範圍

測量方法	示波震盪法
血壓測量範圍	0mmHg(0kPa)~300mmHg(0.0~40.0 kPa)
脈搏範圍	40~200 bmp
精確度	壓力為 ±2mmHg (±0.267kPa)
打氣方式	壓力泵自動加壓
適配手臂圍	17~45 cm

列印方法

熱感列印	紙張尺寸 57mm
------	-----------

連結方法

USB	符合USB 2.0, USB導線不可超過2公尺。 資料輸出格式請洽授權經銷商
-----	---

許可證字號:衛部醫器製字第 008018 號

規格如有更改,恕不另行通知。本設備符合 IEC60601-1-2:2014標準。
臨床評估依照 ISO 81060-2:2013 下進行。

選購配件



扶手

型號: HD-510-AP



電源線

型號: APOC-US110-18



壓脈帶

型號: MD-510-C



印刷紙(10捲/盒)

型號: DPAR-TMOP-58



資料傳輸線(USB Type A to B)

型號: AUTR-510-2M

Comdek®

COMDEK INDUSTRIAL CORP.

7F., No.1, Alley 6, Lane 235, Pao Chiao Rd.,
Hsin Tien Dist, New Taipei City 23145, Taiwan
Tel: +886-2-2918-1266
Fax: +886-2-2918-1277
E-MAIL: info@comdek.com
www.comdek.com



官方網站

2025/01/06 V2